


## Åpne stolen

1. Hold fast i forelengelsen av håndtaket og dra opp til den låses i full lengde
2. Dra beltet for hodestøtte og bryst ned til midten av stolen
3. Løsne sikkerhetsbeltet og skyv setet nedover

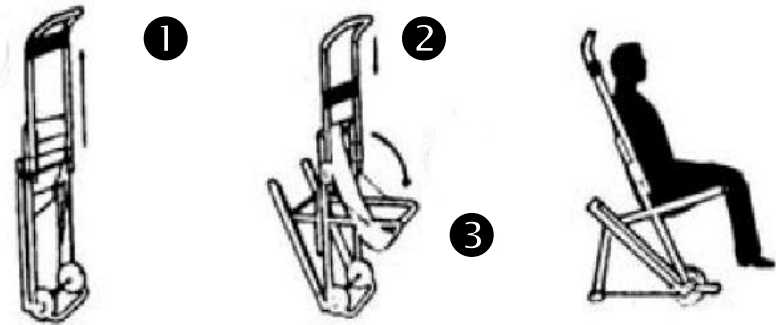

## Bruk stolen

Les og følg disse instruksjonene nøye. Det er viktig at de personer som mest sannsynlig vil håndtere stolen øver på dette sammen med den som vil bli passasjer i en nødsituasjon. Feil bruk kan medføre alvorlige skader.



**1** Sett stolen i oppreist stilling og sørg for å sikre passasjerens med belte foran brystet og eventuelt foran pannen.



**2** Hold i begge sider av håndtaket og vipp stolen bakover og balanser passasjerens vekt over de to hovedhjulene.



**3** Plasser stolen på kanten av trappen, og skyv fremover. Når stolen begynner å gli nedover skift grep til toppen av håndtaket.


**4** Hold et fast grep i stolen hele tiden og avpass hastigheten for å sikre best mulig fotfeste under nedstigningen.

**5** Hold godt tak i stolen og press hele tiden håndtaket nedover for å mykest mulig transport nedover trappene.

**6** Når hjulene berører en landingsflate - hold stolen i balanse og sving den mot neste trappeavsats. Gjenta pkt 3.

## Slå sammen stolen

1. Dra beltet for hodestøtte og bryst helt opp på opp på håndtaket.
2. Trykk ned fjærlåsene og trykk håndtaket nedover
3. Slå setet opp og bruk beltene til å sikre stolen for oppbevaring

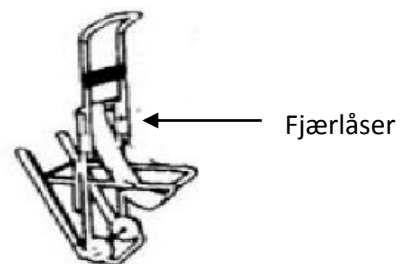

**NEI**

La aldri stolen gli ut ved landing.

Sving med vekten over akslingen

**JA**

